

MODE D'EMPLOI STERILISATEUR

Réf. : STEUVC

CONSEILS DE SÉCURITÉ : Les radiations sont extrêmement nocives pour tous les organismes vivants, l'utilisateur doit donc apporter un soin particulier à se protéger de tout contact direct.

Pour changer la lampe : débrancher l'appareil et laisser la lampe refroidir. Retirer ensuite la lampe avec grande précaution pour éviter qu'elle n'explose car elle est sous haute pression. Enfin, insérer une lampe neuve **de la même marque et aux caractéristiques identiques**.

Si le câble d'alimentation devient défectueux, il doit être remplacé par un technicien qualifié ou le *service après-vente agréé afin d'éviter tout problème*.

L'appareil doit être nettoyé uniquement après avoir été débranché et à l'aide d'un chiffon humide ou de désinfectant. En cas de nettoyage avec des produits à base d'alcool, laisser l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.

Ceci est un appareil électrique soumis à la directive de l'UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, il doit donc être jeté dans un conteneur spécifique.

ATTENTION : *Ne pas regarder la lampe sans protection. En effet, cela pourrait affecter votre vue.*

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

UTILISATION :

- 1) Brancher l'appareil et ouvrir le couvercle.
- 2) Placer les objets à stériliser sur l'étagère prévue à cet effet et fermer le couvercle.
- 3) Allumer le stérilisateur à l'aide du bouton situé à l'arrière de l'appareil.
- 4) Laisser les objets à l'intérieur du stérilisateur pendant environ 10 minutes.
- 5) Éteindre l'appareil. Ouvrir le couvercle et retirer les objets désinfectés.

Cet appareil offre une excellente désinfection grâce à sa lampe à rayons UVC avec longueur d'ondes de 253.7 nm. L'exposition aux basses longueurs d'onde des ultraviolets tue les germes, bactéries et inactive les virus. Il est recommandé pour les objets de petite dimension en plastique ou en métal, tels que les peignes, les brosses, les pinces à cheveux, les ciseaux et les rasoirs.

Nous conseillons un temps d'exposition de 10 minutes au minimum.

IMPORTANT : **Seulement la partie frappée par la lumière directe est désinfectée, tourner l'objet et répéter le temps d'exposition.**

La lampe ne produit pas d'ozone.

Après la désinfection, conserver les objets à l'intérieur de l'appareil permet de préserver leur désinfection.

Le stérilisateur doit être posé sur une surface plane, stable et éloignée de toute source d'eau, comme par exemple une baignoire ou un lavabo, pouvant présenter un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Il est doté d'un interrupteur interne qui s'active lors de l'ouverture ou de la fermeture manuelle du couvercle pour une protection renforcée.

Cet appareil est équipé d'une lampe à rayons UVC, 9 Watts, d'une durée de vie de 8 000 heures. Les lampes UVC sont utilisées pour éliminer et détruire bactéries, virus et autres organismes primitifs.